

# JET LUX

## JET LUX EST UNE MOUSSE SPORICIDE À BASE DE DIOXYDE DE CHLORE (ClO<sub>2</sub>) POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES DURES NON-POREUSES

### COMMENT L'UTILISER ?



1 Pour assembler JET LUX, prenez un pulvérisateur et dévissez les bouchons du flacon. En suivant les indicateurs rouge A et bleu B sur l'étiquette du flacon, insérez le tube rouge du côté du flacon marqué avec le A rouge et le tube bleu du côté du flacon marqué avec le B bleu.



2 Fixez les leviers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de chaque côté de votre pulvérisateur. Assurez-vous que la buse soit alignée sur la ligne supérieure de la tête du pulvérisateur. JET LUX est maintenant prêt à l'emploi.



3 Appliquez au moins 2 doses sur une lingette.



4 Essuyez sur la surface.



5 Assurez-vous que la surface reste humide pendant 1 minute. Appliquez plus de solution si nécessaire. Laissez sécher.



6 Quand vous ne pouvez pas recycler, réutilisez ! Lisez la section "GRAND IMPACT" ci-dessous pour en savoir plus.

### CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Quelques rappels importants avant de commencer :

- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Portez les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé.
- JET LUX est uniquement destiné à un usage professionnel.
- Veillez à ce que le produit soit appliqué dans des conditions comprises entre 18°C et 25°C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en laiton, cuivre, aluminium, acier doux ou argent.
- Nettoyez, rincez et séchez soigneusement la surface avant utilisation.



Consultez le guide utilisateur pour des instructions complètes.

### GRAND IMPACT

Votre pulvérisateur JET LUX doit être réutilisé avec le second flacon JET LUX. Pour ce faire, dévissez les leviers dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le pulvérisateur.

Avant de suivre les instructions d'assemblage ci-dessus, rincez soigneusement les tubes à l'eau du robinet et séchez-les avec une serviette en papier. Après utilisation, les flacons JET LUX vides et les bouchons peuvent être envoyés au recyclage.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

JET LUX peut être conservé pendant 2 ans avant d'être utilisé et doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre 10°C et 35°C.

Une fois ouvert, JET LUX peut être conservé 6 mois. Vous pouvez suivre ceci en notant le jour où vous avez ouvert JET LUX sur l'étiquette du flacon (en utilisant un stylo indélébile).



**cache**<sup>™</sup>  
Désinfection sporicide  
des surfaces



**Tristel Solutions Ltd**

Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell,  
Cambridgeshire, CB8 7NY, UK - T: +44 (0) 1638 721500  
E: mail@tristel.com - W: www.thecachecollection.com

**EC REP**

Tristel SA, Smalldaan 14B, 2660 Anvers, Belgique  
T: +32 (0)3 889 26 40 - E: belgium@tristel.com - W: www.thecachecollection.com/be-fr/

Tristel SAS, Boulevard de la Liberté 130, 59000 Lille, France  
T: +33 (0)3 66 88 01 84 - E: france@tristel.com W: www.thecachecollection.com/fr-fr/

Numéros d'enregistrement biocide: BE-REG-01505 (Belgique), DI-22-00358 / No. 70432 (France).