

HOE TE GEBRUIKEN



Om JET LUX in elkaar te zetten, neemt u een spuitpistool, schroeft u de doppen los en steekt u de rode leiding in de kant van de fles gemarkeerd met de rode A en de blauwe leiding in de kant van de fles gemarkeerd met de blauwe B, waarbij u de rode A en blauwe B indicatoren op het etiket van de fles volgt.



Bevestig de hendels linksom aan beide zijden om uw spraykop te vergrendelen. Zorg ervoor dat het mondstuk is uitgelijnd met de bovenste lijn op de spraykop. JET is nu klaar voor gebruik.



Breng ten minste 2 dosissen aan op een doekje.



Veeg uit over het oppervlak.



Zorg ervoor dat het oppervlak gedurende 1 minuut nat blijft. Breng indien nodig extra oplossing aan. Laat het drogen.



Als u niet kunt recycleren, gebruik het dan opnieuw!

CONTROLES VÓÓR GEBRUIK

Enkele belangrijke geheugensteuntjes voor u begint:

- Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd het productetiket en de productinformatie.
- Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Niet gebruiken als het product beschadigd is.
- JET LUX is alleen voor professioneel gebruik.
- Zorg ervoor dat het product aangebracht wordt tussen 18 en 25°C.
- Niet aanbrengen op oppervlakken van messing, koper, aluminium, zacht staal of zilver.
- Reinig, spoel en droog de oppervlakken zorgvuldig voordat u het product gebruikt.



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de volledige instructies.

GROTE IMPACT

Uw JET LUX spuitpistool kan opnieuw gebruikt worden met de tweede JET LUX fles. Om de spuitpistool te verwijderen draait u de hendels met de klok mee los.

Voordat u de bovenstaande montage-instructies volgt, spoelt u de doppelbuizen grondig af met kraanwater en droogt u ze met een papieren doekje. Na gebruik kunnen lege JET LUX flessen en doppen voor recycling worden opgestuurd.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

JET LUX kan maximaal 2 jaar worden bewaard voordat het gebruikt wordt en moet op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht, tussen 10°C - 35°C bewaard worden.

Eenmaal geopend heeft JET LUX een gebruiksduur van 6 maanden. U kunt dit bijhouden door de dag waarop u JET LUX geopend hebt op het etiket van de fles te noteren met permanente inkt.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor volledige instructies.

