


## 如何使用



在容器內加入 5 公升清水。  
注意：切勿使用熱水。

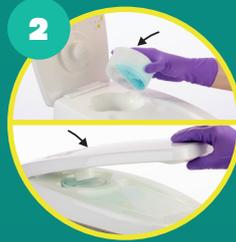

將一個消毒劑膠囊膠面朝下放入空格，  
合上蓋子使其破裂，消毒劑流入水中。



打開蓋子，取走已清空的膠囊。  
經沖洗後，膠囊可作回收。



再倒入 5 公升清水於容器內。



等待 15 分鐘，  
殺芽孢消毒液現可使用。



向上翻動水龍頭，將消毒液倒入  
可重複使用的 500 毫升瓶子作使用準備。



稀釋好的消毒液可於容器內保存五天，  
或在 500 毫升瓶子內保存 24 小時。  
可於容器蓋子和瓶子上以油性箱頭筆  
紀錄準備日期和時間。



消毒液可以倒在任何擦拭巾上  
或直接倒在需要擦拭的表面。



確保最少 5 分鐘接觸時間。

## 使用前檢查

重要提醒：

- 確保安全使用殺菌劑。使用前請務必閱讀產品上的標籤和產品資訊。
- 請配戴合適的個人防護裝置，如手套。
- TANK 二氧化氯消毒劑僅供專業醫療用途。
- 不適用於黃銅、銅、鋁、低碳鋼或銀表面。
- 使用前請確保表面已去除重度污垢。
- 在準備消毒液前，請確保 TANK 容器已被清空。它應被放置於平坦的表面上，並靠近水源。於灌裝前水龍頭必須關妥。

## TANK 容器清潔方法

如需清潔 TANK 容器，請用乾燥的低絨布擦拭所有表面。  
請勿將 TANK 容器浸入水中。

## 儲藏條件

TANK 二氧化氯消毒膠囊保存期為 2 年，應儲存在陰涼乾燥處、避免陽光直射、在 10°C - 35°C 之間。



詳情請參閱使用手冊。